


AUREX®

Spray auricular

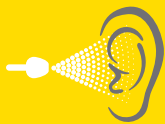

Un dispozitiv medical sub formă de spray auricular, care ajută la îndepărtarea dopurilor de ceară, reducând riscul de inflamație.

COMPOZIȚIE


Glicerină, propilen glicol, peroxid de carbamidă, apă purificată, edetat disodic, acid tartric, citrat de sodiu, etanol.

INDICAȚII

Pentru igiena regulată a urechii, pentru a elimina depozitele de ceară și a reduce riscul de inflamație.

CUM FUNCȚIONEAZĂ AUREX® SPRAY AURICULAR

AUREX® Spray auricular, conține compuși care ajută la înmuierea dopurilor de ceară. De asemenea, conține peroxid de carbamidă (un compus activ) care eliberează oxigen activ în ureche, provocând deplasarea dopului de ceară.

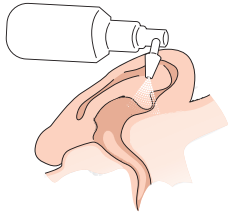

EFECTE SECUNDARE

Efectele secundare ale AUREX® Spray auricular nu sunt cunoscute, cu toate acestea, la persoanele deosebit de sensibile, simptomele alergice nu pot fi excluse. Dacă apare o reacție alergică, opriți utilizarea produsului.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI PRECAUȚII

Nu utilizați produsul dacă sunteți alergic la oricare dintre ingrediente.
Nu utilizați produsul dacă suferiți de dureri de urechi, inflamație prelungită a urechii medii sau a canalului urechii sau dacă timpanul este perforat.
Femeile însărcinate și copiii cu vârsta sub 12 ani pot utiliza produsul numai sub supraveghere medicală.
Nu introduceți dozatorul prea adânc în canalul urechii.
Preveniți contactul accidental cu ochii și gura.
Opriți utilizarea produsului în cazul oricărui simptom alarmant.
Utilizați în termen de șase luni de la deschidere.
Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din țara de reședință a pacientului.
Autoritate Nationala Competenta: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478-RO
Tel: + 4 0757 117 259
Fax: +4 0213 163 497
e-mail: adr@anm.ro

UTILIZARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Utilizați AUREX® Spray auricular de două ori pe zi (dimineața și seara) timp de patru zile.

- 1. Încălziți ușor sticla (de preferință în mâini) (fig.1).
- 2. Puneți aplicatorul în ureche și înclinați ușor capul (fig. 2).
- 3. Dacă medicul dumneavoastră nu vă sfătuiește altfel, aplicați 1-2 doze (pompa aplicatoare apăsați) și rămâneți în această poziție timp de 3-5 minute (fig. 3).

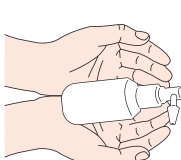


fig. 1

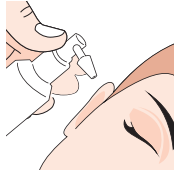


fig. 2

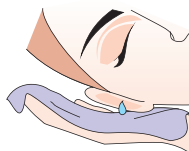


fig.3

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi de sub 25°C, la loc uscat, departe de îndemâna copiilor.

Ambalaj

15 ml

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej,
Nasutów 99C, 21-025 Niemce, Polonia

Produs în UE pentru:
Alpen Pharma AG,
Bern, Elveția



SEMNIFICATIA SIMBOLURILOR:

LOT	LOT
	A se utiliza pana la
	A se citi instructiunile pentru utilizare
	Data fabricatiei
	Producător
	Limita de temperatura pana la care poate fi expus in siguranta produsul

Data ultimei revizuirii a textului: 10.04.2020

- Pantone 109 C
- Pantone Cool Gray 11 C
- Pantone Black C
- Pantone 485 C