

Preveniți contactul accidental cu ochii.  
Opriiți utilizarea produsului în caz de simptome alarmante.  
A nu se utiliza după data de expirare!  
În caz de contaminare, îndepărtați aplicatorul, spălați-l și fierbeți-l sau clătiți-l bine cu apă clocotită.  
Femeile gravide și copiii cu vârsta sub 6 ani pot utiliza produsul numai sub supraveghere medicală.  
Produsul poate fi utilizat pe perioade lungi de timp, fără risc de dependență, efecte secundare sau complicații.  
Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din țara de reședință a pacientului.

Autoritate Nationala Competenta: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478-RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

#### UTILIZARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Utilizați produsul de 3-4 ori pe zi, în funcție de nevoile individuale.

Apăsați dozatorul de mai multe ori înainte de prima utilizare.

Așezați aplicatorul în cavitatea nazală.







Aplicați 1-2 doze în fiecare nară.

#### CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra la o temperatură sub 25 °C, într-un loc uscat, nu lăsați la îndemâna copiilor.

Ambalaj 20 ml

#### SEMNIFICATIA SIMBOLURILOR:

	LOT
	A se utiliza pana la
	A se citi instructiunile pentru utilizare
	Data fabricatiei
	Producător:
	Limita de temperatura pana la care poate fi expus in siguranta produsul

Data revizuirii textului: 01.09.2020

 ARKONA Laboratorium  
Farmakologii Stomatologicznej,  
Nasutów 99C, 21-025 Niemce,  
Polonia



Produs în UE pentru:  
Alpen Pharma AG,  
Bern, Elveția

