

A nu se utiliza după data de expirare!

Femeile gravide și copiii cu vârsta sub 6 ani pot utiliza produsul numai sub supraveghere medicală.

Produsul poate fi utilizat pe perioade lungi de timp, fără risc de dependență, efecte secundare sau complicații.

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din țara de reședință a pacientului.

Autoritate Națională Competentă: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478-RO

Tel: +4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

UTILIZARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Utilizați produsul de 3-4 ori pe zi, în funcție de nevoile individuale.

Apăsăți dozatorul de mai multe ori înainte de prima utilizare.

Așezați aplicatorul cât mai profund posibil în cavitatea bucală și îndreptați-l spre gât.

Aplicați 3-4 doze (aplicatorul preselor pompei).

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra la o temperatură sub 25°C, într-un loc uscat, nu lăsați la îndemâna copiilor.

Ambalaj 20 ml

SEMNIFICATIA SIMBOLURILOR:

	LOT
	A se utiliza pana la
	A se citi instructiunile pentru utilizare
	Data fabricatiei
	Producător:
	Limita de temperatura pana la care poate fi expus in siguranta produsul

Data revizuirii textului: 01.09.2020

 ARKONA Laboratorium
Farmakologii Stomatologicznej,
Nasutów 99C, 21-025 Niemce,
Polonia

 Produs în UE pentru:
Alpen Pharma AG,
Bern, Elveția

